


| | | |
|---|---|--------------------|
|  | CapsoCam Plus (<i>international</i>) Patientvejledning til fjernadministration (hjemme) af kapsler under Medicinsk overvågning via video | IFU-6461-DA |
| | | Revision: B |

Instruktionerne nedenfor gives, hvis du er kvalificeret til at sluge CapsoCam Plus-kapslen derhjemme.

1. Før du modtager CapsoCam Plus-kapslen, bør din læge have stillet dig spørgsmål om din medicin og kliniske historik. De skal have modtaget dit informerede samtykke til indgrebet derhjemme. De vil også planlægge et videoopkald med dig.

ADVARSEL: Du må ikke sluge kapslen, medmindre din læge eller en medarbejder ser på dig via videoopkaldet.

2. I begyndelsen af videoopkaldet vil din læges kontor bekræfte, at:
 - Du har modtaget CapsoCam Plus kapselendoskopet og det tilhørende tilbehør.
 - Der er ikke sket ændringer i din medicinske tilstand, siden de sidst spurgte dig om din kliniske historik.
 - Der er en voksen til stede ved siden af dig, som kan følge instruktionerne, hvis du har problemer med at sluge kapslen.
3. Umiddelbart før du sluger kapslen, vil din læge bede dig om at gøre det:
 - Tjek kapselemballagen for skader.
 - Tjek tilbehøret for skader eller manglende dele. Din læge vil fortælle dig, hvilke ting der skal med.
 - Klargør et glas vand eller en vandflaske.
 - Hold kapslen foran dit videokamera, og se på LED-lysene for at bekræfte, at de blinker.
 - Tag en lille slurk vand for at fugte munden, læg kapslen i munden, og slug den sammen med 0,5 liter vand.
4. På dette tidspunkt vil din læge eller personalet begynde en 5 minutters observationsperiode. I løbet af denne observationsperiode vil du blive bedt om at:
 - Gå rundt i et par minutter for at sikre, at kapslen er blevet slugt korrekt.
 - Bekræft, at du ikke har vejrtrækningsbesvær.
 - Se instruktioner demonstreret af lægen om, hvordan man bruger CapsoRetrieve-kapseludtagningssettet
5. Efter observationsperioden afsluttes videoopkaldet.

Du kan deltage i normale daglige aktiviteter, mens kapslen bevæger sig i din fordøjelseskanal. Rådfør dig med din læge, hvis du har spørgsmål om at deltage i en aktivitet. Kapslen går passerer typisk gennem dit system i løbet af 3 til 30 timer. Kontakt din læge, hvis der er gået mere end 72 timer, og du stadig ikke har udskilt kapslen. Returner den udtagne kapsel som anvist af din læge.