

SUPPLEMENT TIL "IFU-2320 CAPSOCAM PLUS BRUGSANVISNING"

Nedenstående instruktioner vedrører fjernadministration af CapsoCam Plus under lægeligt tilsyn via video. Denne vejledning er et supplement til brugsanvisningen (IFU-2320) til CapsoCam Plus og omhandler kun de instruktioner, der er specifikke for fjernadministration af kapslen. Derfor repræsenterer nedenstående instruktioner ikke den komplette mærkning af CapsoCam Plus. Læs IFU-2320, før du læser dette tillæg til mærkningen.

Produktet er testet for indtrængningsbeskyttelse i klassificeringen IP68. Den kan modstå støv, snavs og sand og er modstandsdygtig over for nedsænkning op til en meters dybde under vandet.

Forberedelse til brug

1. Bestem, om patienten har øget risiko for kvælning og/eller kapselaspiration ved at fjernadministrere **IFU-6437-spørgeskema til risikovurdering af patient** til patienten. Hvis patienten har øget risiko for kvælning og/eller aspiration af kapslen, skal du ikke fortsætte med fjernadministration af kapslen.
2. Indhent informeret samtykke fra patienten i henhold til din institutions politik.
3. Kontrollér folieforseglingen. Giv ikke kapslen til patienten, hvis der observeres brud på folieforseglingen eller på selve folien. Se *brugsanvisningen til CapsoCam Plus* for at få flere oplysninger.
4. Pak **patientmærkningen (IFU-6461)**, CapsoCam-kapselendoskopet, CapsoRetrieve-kapseludtagningssettet og en handske (du kan bruge en hvilken som helst type engangshandske, du har til rådighed) til håndtering af kapslen sammen i samme pakke. Send pakken til patienten ved at bruge din facilitets foretrukne forsendelsesmetode. Send ikke forsendelser, hvis patienten har opgivet en udenlandsk postadresse.
5. Planlæg videoopkald til indtagelse af kapsler.

BEMÆRK:

- **Fjernadministrationen af kapslen skal visualiseres direkte af en uddannet sundhedsperson.**
- **Før patienten sluger CapsoCam Plus, skal den ledsagende voksne have en henvisning til førstehjælp ved kvælning.**

Brugsanvisning

Når du er klar til at starte videoopkaldet, skal du sende en e-mail eller sms-invitation til patienten med et link til at starte videoopkaldet.

1. Kontrollér, at patienten har modtaget et CapsoCam Plus kapselendoskop, CapsoRetrieve kapseludtagningsset og handske uden skader på pakken eller dens indhold.
2. Kontrollér, at der ikke er sket ændringer i patientens medicinske tilstand eller i patientens svar på spørgeskemaet **IFU-6437-Patient Risk Assessment Questionnaire**, der ville diskvalificere patienten til fjernadministration af kapslen.
3. Kontrollér, at der er en voksen til stede ved siden af patienten under videoopkaldet, og at denne voksne er i stand til og indvilliger i at hjælpe og følge dine instruktioner, hvis patienten har problemer med at sluge kapslen. Kontrollér, at den voksne har en bil til rådighed i tilfælde af, at der er behov for et øjeblikkeligt besøg på en akutklinik.
4. Bed patienten om at inspicere folieforseglingen. Må ikke bruges, hvis der observeres brud på folieforseglingen eller selve folien. Se *brugsanvisningen til CapsoCam Plus* for at få flere oplysninger.

5. Bed patienten om at åbne kapselpakken ved at trække foliedækket tilbage.
6. Bed patienten om at tage den medfølgende handske på og fjerne plastiklåget, der dækker kapslen.
7. Bed patienten om forsigtigt at tage fat i kapslen og trække den ud og væk fra pakken uden at trække magneten ud af pakken. Bed dem om at passe på, at de ikke taber kapslen på gulvet.
8. Bed patienten om at holde kapslen foran kameraet, så du kan sikre dig, at den er blevet aktiveret. Se *brugsanvisningen til CapsoCam Plus* for at få flere oplysninger.
9. Bed patienten om at indtage kapslen med 0,5 liter (~16 væskeunser) vand. Hvis patienten forsøger at sluge kapslen, men det ikke lykkes, kan de forsøge at sluge den en gang til. Hvis det andet forsøg ikke lykkes, skal du ikke fortsætte med fjernadministration af kapslen.
10. Når patienten har bekræftet, at han/hun har indtaget kapslen uden problemer, skal du observere patienten i 5 minutter og bede ham/hende om at gå en tur på 1-2 minutter for at sikre, at der ikke er vejrtrækningsbesvær eller andre problemer. Bed dem om at sørge for at rapportere til dig, hvis de får vejrtrækningsbesvær.
11. Under eller efter den 5 minutter lange observationsperiode skal du undervise patienten i, hvordan man bruger udtagningssettet. Se *brugsanvisningen til CapsoRetrieve* for mere information.

I tilfælde af mistanke om kapselaspiration skal du ringe til det lokale alarmnummer eller straks bede den ledsagende voksne om at gøre det:

1. Få patienten til at rejse sig op.
2. Placer dig selv bag patienten.
3. Læn patienten forover, og giv fem slag på patientens ryg med håndroden.
4. Placer vedkommendes arme omkring patientens talje.
5. Knyt hånden, og placer den lige over patientens navle med tommelfingeren indad.
6. Tag fat i deres næve med den anden hånd, og skub den indad og opad på patienten på samme tid.
7. Udfør fem af disse mavebøjninger.
8. Gentag trin 2-7 (skiftevis slag bagud og stød mod maven), indtil kapslen er udstødt, og patienten kan trække vejret eller hoste selv.
9. Hvis det ikke lykkes at få kapslen ud, skal du straks ringe til alarmnummeret.